

Bruks- och rekondanvisning

Gipsbenstöd

Våra gipsbenstöd är anpassade för användning tillsammans med flera olika manuella rullstolsmodeller.

Artikelnummer och benämning:

- 8139055 – Benstöd gipsbenstöd sittyta 30x30 cm
- 8139056 – Benstöd gipsbenstöd sittyta 35x35 cm

Passar bland annat:

Etac Cross, Voltornus Start M6, Panthera, Sunrise Quickie m.fl

Bruksanvisning

Montering

1. Placera gipsbenstödet på rullstolens sits och vänd stödet för vänster eller höger ben beroende på användning.
2. Trä spännremmarna genom öppningen där stolens sits och rygg möts vid hörnen.
3. Spänn remmarna runt det tvärgående staget på rullstolens baksida. Observera att remmarna ska dras på insidan av vajern som används för att fälla ryggstödet.
4. Kontrollera att spännremmarna är korrekt monterade och ordentligt åtdragna.
5. Kontrollera från både fram- och baksida att produkten sitter stabilt monterad innan användning.

Rekond / Rengöring

Rengöring före desinfektion

- Avlägsna synlig smuts med vatten och mildt rengöringsmedel.
- Rengör samtliga ytor, inklusive undersidor och infästningar.

Desinfektion

- Applicera godkänt desinfektionsmedel enligt verksamhetens rutiner.
- Följ rekommenderad kontakttid enligt tillverkaren av desinfektionsmedlet. Säkerställ att alla kontaktytor behandlas.
- Låt produkten lufttorka eller torka enligt instruktion.

Inspektion efter rengöring

- Kontrollera om produkten har sprickor eller andra skador.
- Kontrollera stoppning och dynor och byt vid behov.
- Bedöm om produkten är säker att återanvända.

Funktionskontroll

- Kontrollera att gipsbenstödet sitter stabilt monterat i rullstolen.

Avvikelsehantering

- Produkten ska kasseras vid allvarlig skada eller om hygienrisk föreligger.