

Monteringsanvisning

Ekerskydd

Våra ekerskydd är anpassade för manuella rullstolar och monteras på drivhulets utsida för att skydda händer och kläder från att komma i kontakt med ekrarna.

Montering

- Rengör ekrarna på rullstolens hjul och kontrollera att hjulet är i gott skick.
- Placera ekerskyddet på hjulets utsida och säkerställ att det ligger an mot ekrarna.
- Fäst ekerskyddet med buntband i de förborrade hålen.
- Ekerskyddet ska fästas med fyra fästpunkter.
- Infästningsmaterial i form av 4 st buntband ingår i leveransen.

Anpassning

Vid behov kan ekerskyddet anpassas genom att materialet skärs eller klipps till. Det är även möjligt att borra nya hål för alternativ infästning.