

Rekond och bruksanvisning

Länkhjul till manuella rullstolar

Haco Tellus länkhjul för manuella rullstolar är kompatibla med rullstolsmodellerna HD, Etac Cross, Invacare, Panthera och Azalea. Produktblad med teknisk information och kompatibilitet för respektive länkhjul och rullstolsmodell finns tillgängliga för nedladdning på hemsidan.

Montering

Rullstolsmodeller: HD, Etac Cross, Invacare, Panthera, Azalea

- Montera av det gamla länkhjulet från rullstolen. Detta monteras av med handverktyg anpassat för hjulaxelns storlek.
- Montera det nya ersättningshjulet på rullstolen. Detta monteras på med handverktyg.
- Kontrollera före användning att framgaffeln snurrar obehindrat utan att lagren hugger.

Skötsel / Rekond

Rullstolsmodeller: HD, Etac Cross, Invacare, Panthera, Azalea

- Rengör hjulen från hårstrån och avlagringar mm.
- Rengöring av länkhjulen görs med mildt rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med handduk samt kontrollera att länkhjulet sitter rätt monterat. Tänk på att inte spola vatten direkt på kullagren då de då kan rosta.
- Använd gärna en mjuk trasa vid avtorkning.
- Länkhjul som har skevhet, sprickor, rostskador eller deformationer skall bytas. De ger nedsatt funktion på rullstolen.